

Használati Útmutató

MEDtrend TD-2555 testsúlymérleg


A MEDtrend TD-2555 testsúlymérleg egy Bluetooth kommunikációval ellátott mérőeszköz.

Alkalmas testsúly mérést követően, a mérési eredmény (testsúly) automatikus Bluetooth csatornán keresztül történő küldésére fogadó eszköz részére.

Igény esetén beállíthatók az eszközön személyes adatok (nem, kor, magasság), amelyek segítségével a testsúly mérést követően a testsúly mérleg automatikus BMI számítást végez.




Jelmagyarázat – kijelző

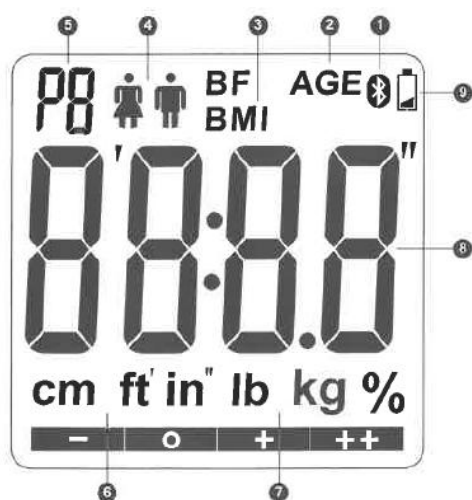

- 1 Bluetooth indikátor
- 2 Életkor indikátor
- 3 BMI indikátor
- 4 Nem indikátor
- 5 Magasság mértékegység
- 6 Súly mértékegység
- 7 Mérési eredmény
- 8 Érték kijelzés
- 9 Elem töltöttség indikátor

Jelmagyarázat – elől / hátul nézetek

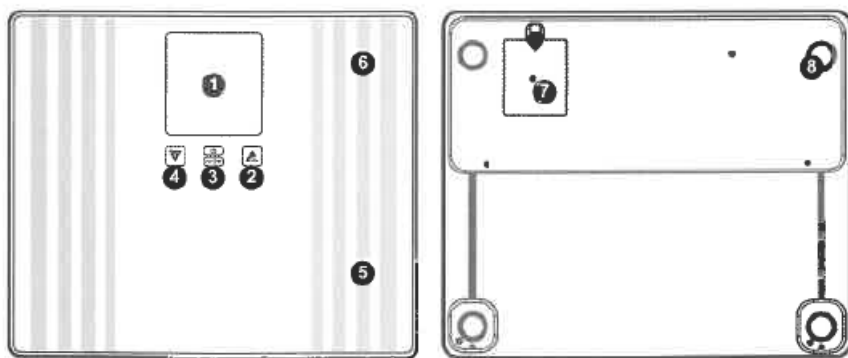

Elöl nézet

- 1 LCD kijelző
- 2 FEL gomb
- 3 BEÁLLÍTÁS (SET) gomb
- 4 LE gomb

Hátul nézet

- 5 Sarok pozíció
- 6 Lábuji pozíció
- 7 Elemtartó fedél
- 8 Támasztó pontok

Üzembe helyezés

MEDtrend TD-2555 testsúlymérleg üzembe helyezéséhez az Elemtartó fedél (7) felnyitását követően a mellékelt 4 db 1.5V AAA elem megfelelő polaritású behelyezésére, majd az Elemtartó fedél (7) visszahelyezésére van szükség.

Használat

A testsúly mérést mindig sima, vízszintes, kemény felületen végezze, nem megfelelő mérési pozíció esetén a mérési eredmény hibás mérési eredményt adhat.

Testsúly méréskor lépjen a sima, vízszintes, kemény felületre helyezett TD-2555 testsúly mérleg jobb és bal oldalán elhelyezett (sávokkal jelölt) felületére, olyan módon, hogy lábfejei között helyezkedjen el az eszköz LCD kijelzője, lábujjai a Lábuji pozíción (6), míg sarka a Sarok pozíción (5) helyezkedjen el, ez a testsúly mérési pozíció.

Személyes profil beállítás (opcionális)

A MEDtrend TD-2555 testsúly mérleg kikapcsolt állapotában nyomja meg a BEÁLLÍTÁS (SET) gombot (3). Ezt követően válassza ki a FEL gomb (2) és a LE gomb (4) segítségével a beállítani kívánt Profil jelzést P1 ... P5, majd nyomja meg a BEÁLLÍTÁS (SET) gombot (3).

Ezt követően a nemének beállításához a FEL gomb (2) és a LE gomb (4) segítségével válassza ki a megfelelő férfi / nő értéket, amelyet a kijelzőn láthat a *Nem indikátor* (4) ikonjainak segítségével, majd nyomja meg a BEÁLLÍTÁS (SET) gombot (3).

Ezt követően a kívánt magasság mértékegység beállításához FEL gomb (2) és a LE gomb (4) segítségével válassza ki a megfelelő cm / ft' in" értéket, amelyet a kijelzőn láthat a *Magasság mértékegység* (5) feliratainak segítségével, majd nyomja meg a BEÁLLÍTÁS (SET) gombot (3).

Ezt követően magasságának beállításához FEL gomb (2) és a LE gomb (4) segítségével állítsa be a megfelelő értéket, amelyet a kijelzőn láthat az *Érték kijelzés* (8) segítségével (magasság

érték beállításakor a kiválasztott *Magasság mértékegység (5)* felirat látható a kijelzőn), majd nyomja meg a BEÁLLÍTÁS (SET) gombot (3).

Ezt követően életkorának beállításához FEL gomb (2) és a LE gomb (4) segítségével állítsa be a megfelelő értéket, amelyet a kijelzőn láthat az *Érték kijelzés (8)* segítségével (életkor érték beállításakor az *Életkor indikátor (2)* AGE felirat látható a kijelzőn), majd nyomja meg a BEÁLLÍTÁS (SET) gombot (3).

Ezt követően végezhet testsúly mérési pozícióban testsúly mérést, vagy 30 másodpercen belül amennyiben nem mozgatja és nem nyom meg további gombot az eszközön automatikusan kikapcsol a testsúly mérleg.

Testsúly mérés beállított profillal

A MEDtrend TD-2555 testsúly mérleg kikapcsolt állapotában nyomja meg a BEÁLLÍTÁS (SET) gombot (3). Válassza ki a FEL gomb (2) és a LE gomb (4) segítségével a kívánt Profil jelzést P1 ... P5, majd álljon rá testsúly mérési pozícióban a TD-2555 testsúly mérlegre.

Specifikáció

Modell azonosító: TD-2555

Tápellátás: 4 db 1.5V AAA elem (tartozék)

Méret és súly: 340 mm (H) x 400 mm (Sz) x 26 mm (M), 3200 gr elemek nélkül

Kijelző méret: 98 mm (H) x 92 mm (Sz)

Kijelző: *inverz háttérvilágított*

Beállítható személyes értékek:

Nem: *Férfi / Nő*

Magasság: *100 cm-től 220 cm-ig*

Kor: *6 –tól 99 évig*

Magasság mértékegység: *cm / ft' in"*

Mérési tartomány: *4 kg-tól 250 kg-ig*

Működési körülmények: *5°C és 40°C között, 85% páratartalom alatt*

Tárolási körülmények: *-25°C és 70°C között, 93% páratartalom alatt*

Elem élettartam: *minimum 3 hónap készenléti üzemmódban, minimum 180 mérés*

Felhasználói profilok: *5 külön beállítás*

Súly mértékegység: *kg / font*

Adatátvitel: *Bluetooth 4.0*

Automatikus kikapcsolás: *testsúly mérést követően 3 perc, beállítást követően 30 másodperc*

Gyártó

TaiDoc Technology Corporation

B1-7F, No. 127, Wugong 2nd Rd.,

Wugu Dist, 24888 New Taipei City, Taiwan

Forgalmazó

Di-Care Zrt.

1116 Budapest, Sáfrány utca 23.

<https://medtrend.hu>