


## Kezdő lépés

SiBio CKM  
rendszer

**Gyors üzembe  
helyezési  
útmutató**

Felülv.: A2 202303

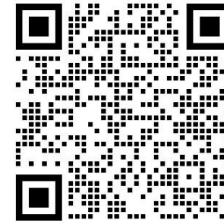

iOS esetén



Android esetén


Okostelefonjával olvassa be a fenti QR-kódot a SiBio CKM angol nyelvű alkalmazás letöltéséhez.

## Az alkalmazás beállítása


The screenshot shows the login interface of the SiBio CKM app. At the top, the time is 10:27 and the language is set to English. Below the status bar, there is a 'Register' link. The main heading reads 'Hello Welcome to SIJOY CKM!'. There are two input fields: 'Password' and 'Verification code'. The 'Password' field contains the email address 'hen.yan@si-bionics.com'. Below the input fields, there is a 'Log in' button. A 'Get verification code' link is also visible next to the verification code field.

Nyissa meg az alkalmazást és kövesse az alkalmazás utasításait a fiók létrehozásához.

## Előkészítés

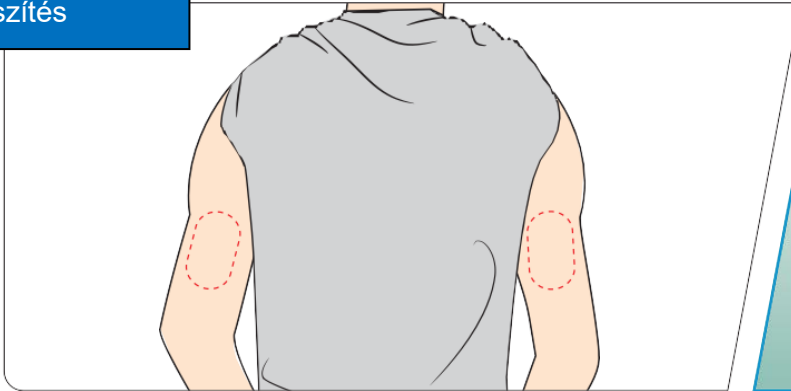


1. lépés: Válasszon ki egy területet a felkarja hátsó részén.

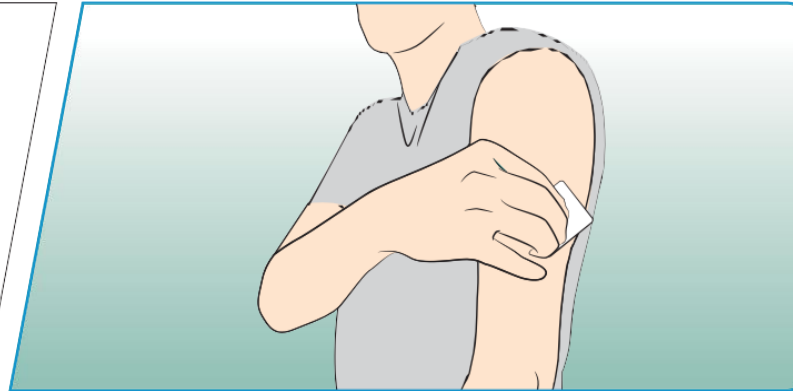


2. lépés: Alkoholos törlőkendővel távolítsa el minden szennyeződést és zsíros maradványt, majd hagyja a bőrt megszáradni a szenzor felhelyezése előtt.




3. lépés: Húzza le a fedőfóliát a szenzor csomagolásáról

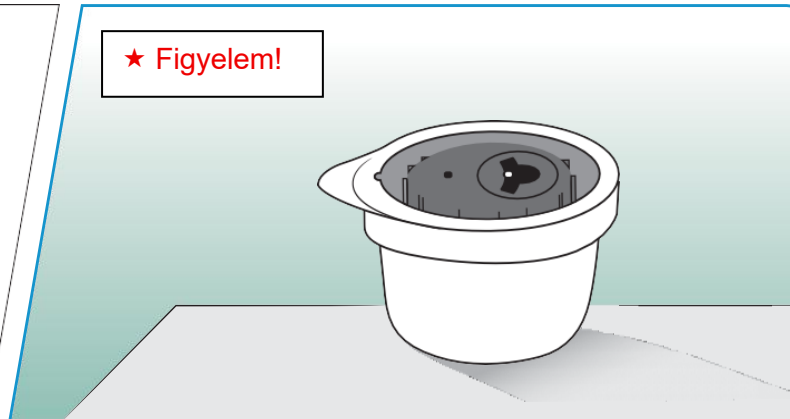


Figyelem! A csomagot sík felületre kell helyezni.

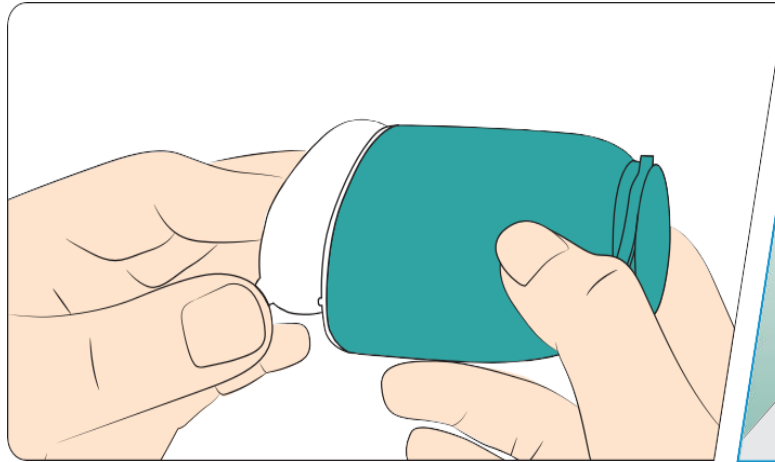


4. lépés: Távolítsa el a kupakot a szenzor applikátoráról.

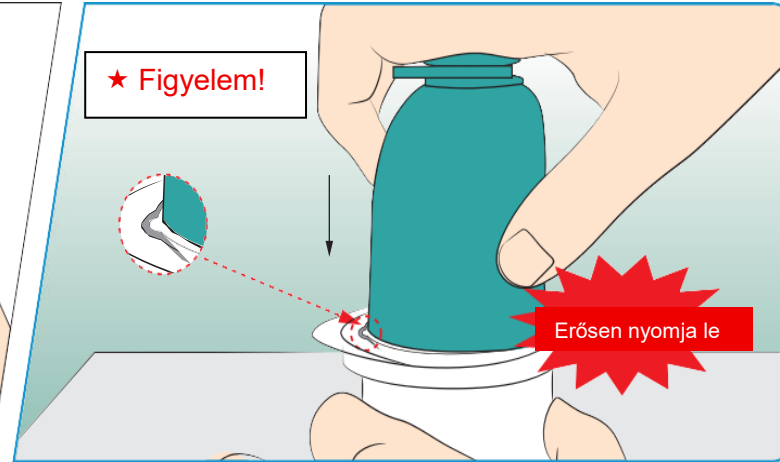


Nyomja erősen lefelé a szenzor applikátorát a csomagra, amíg meg nem áll

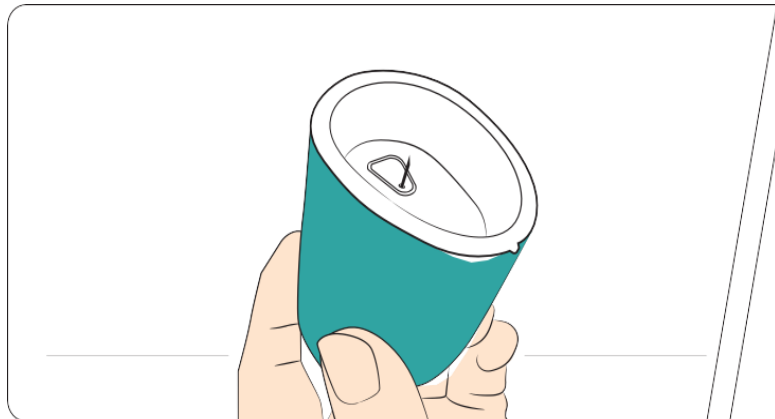

5. lépés: Emelje ki a szenzor applikátorát a szenzor csomagolásából.

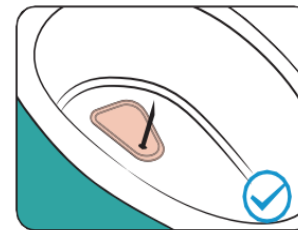


Készen áll

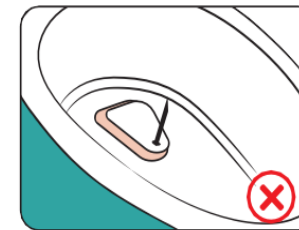


Nem áll készen


Ha az szenzor nem áll készen a felhelyezésre, ismétlje meg a 4. lépésben leírt lenyomó mozdulatot.

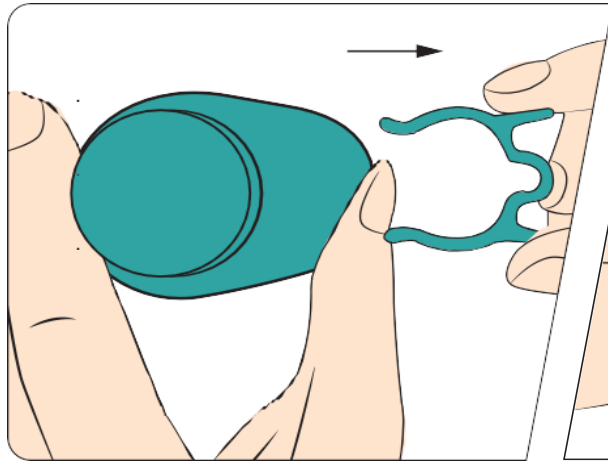

6. lépés: Nyomja meg a biztonsági rögzítőkapocs végeit, majd távolítsa el.

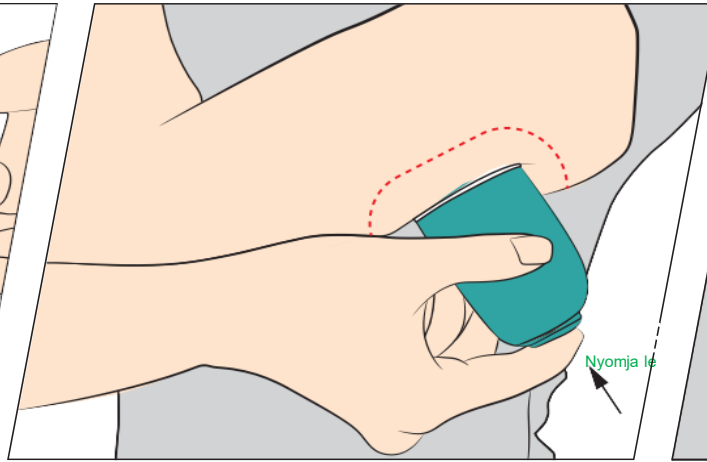


7. lépés: Helyezze a szenzor applikátorát a kiválasztott területre, majd nyomja le a gombot.

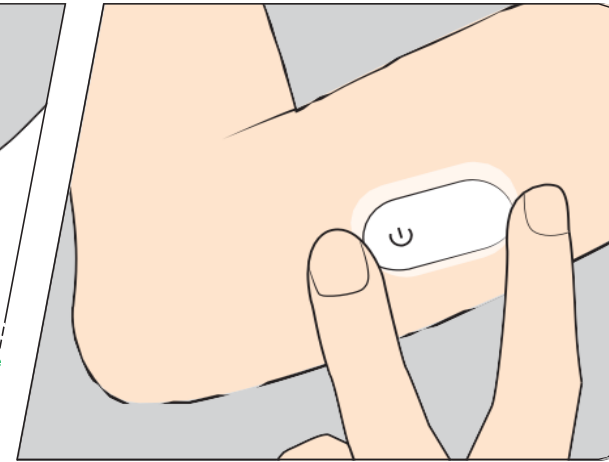

A szenzor most megfelelően fel van helyezve.


## Az alkalmazás használata

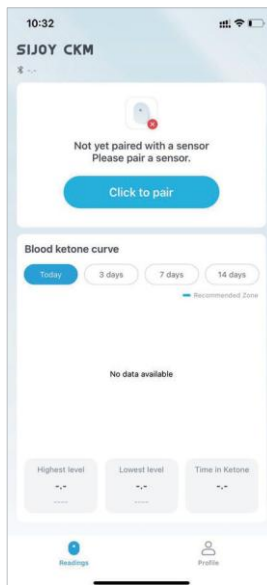

Jelentkezzen be az alkalmazásba, majd koppintson a „Kattintson ide a párosításhoz” lehetőségre



A kamerával olvassa be a dobozon található kódot

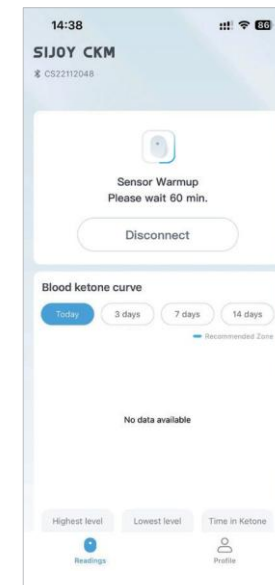

Az szenzor bemelegítési időzítője jelzi, mikortól kezdődnek a mérések

## A szenzor cseréje



A szenzor a 14 napos viselési idő után automatikusan leáll, és ki kell cserélni. Cserélje ki a szenzort akkor is, ha irritációt vagy kellemetlenséget tapasztal a felhelyezés területén

# SiBio

Ezzel a gyors üzembe helyezési útmutató végére ért, és önállóan is felfedezheti az alkalmazást. További információkért tekintse meg az angol nyelvű Felhasználói útmutatót.



Olvassa be a kódot az angol nyelvű Felhasználói útmutató elektronikus változatának eléréséhez